


# Die innovative Applikationshilfe zur Instillation von Surfactant



## NEOFACT®

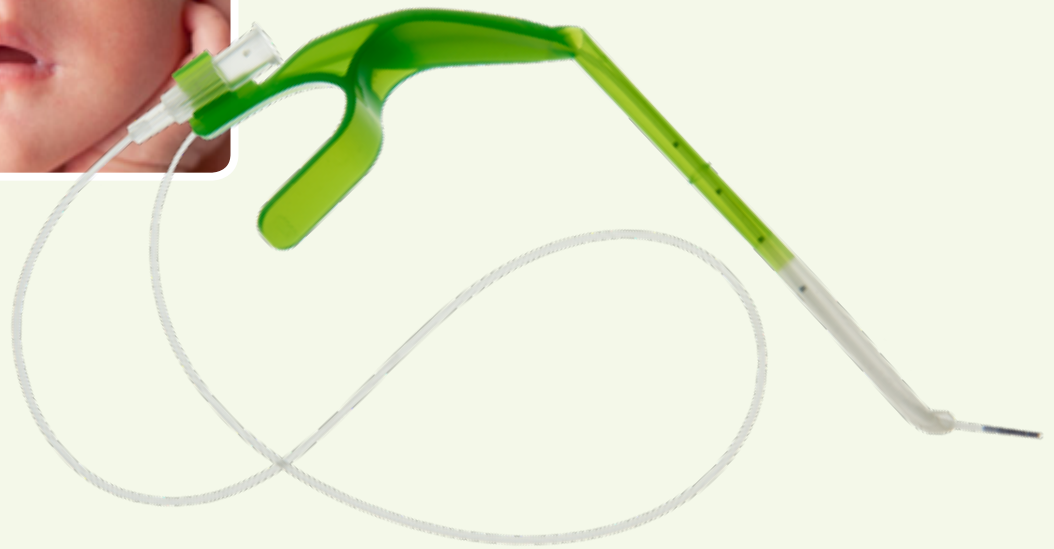

- Einfache und praktische Handhabung
- Surfactant-Applikation ohne Magill-Zange
- Exakte Positionierung vor der Stimmritze

# NEOFACT®

Macht die Surfactant-Applikation einfacher für Sie –  
und schonender fürs Kind

## So wenden Sie die Neofact®-Applikationshilfe an:

1




Die Neofact®-Applikationshilfe ist steril verpackt und für die einmalige Anwendung vorgesehen.

2



Mittels eines Intubationslaryngoskops wird die Zugänglichkeit des Kehlkopfs herbeigeführt.

3

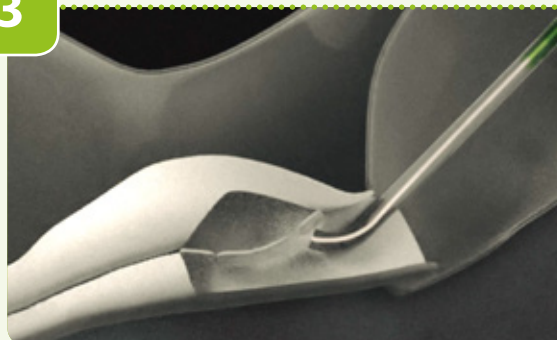

Die Neofact®-Applikationshilfe kann mit nur einer Hand geführt werden. Durch die angewinkelte Spitze kann der Katheter – ohne Magill-Zange – exakt vor der Stimmritze positioniert werden.




4



Der Katheter kann nun einfach mit dem Daumen vorsichtig vorgeschoben werden.

5

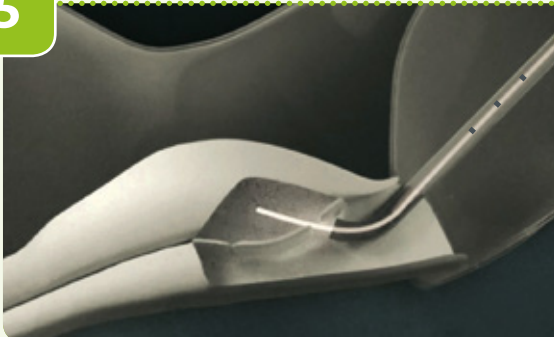

Die Skalierung der Applikationshilfe (Abstände 1 cm) ermöglicht dabei die exakte Kontrolle der Einführtiefe.

6



Nun erfolgt die Instillation von Alveofact®: Durch den langen Katheter kann Alveofact® außerhalb des Arbeits- und Sichtbereichs injiziert werden. Standard-Anschluss über Luer-Lock-System.


Hier gelangen Sie zum  
Neofact®-Anwendungsvideo

[www.lyomark.com/de/neofact/](http://www.lyomark.com/de/neofact/)



# NEOFACT®

## Applikationshilfe mit Tracheal-Katheter: für eine einfache Applikation von Surfactant – ohne Magill-Zange

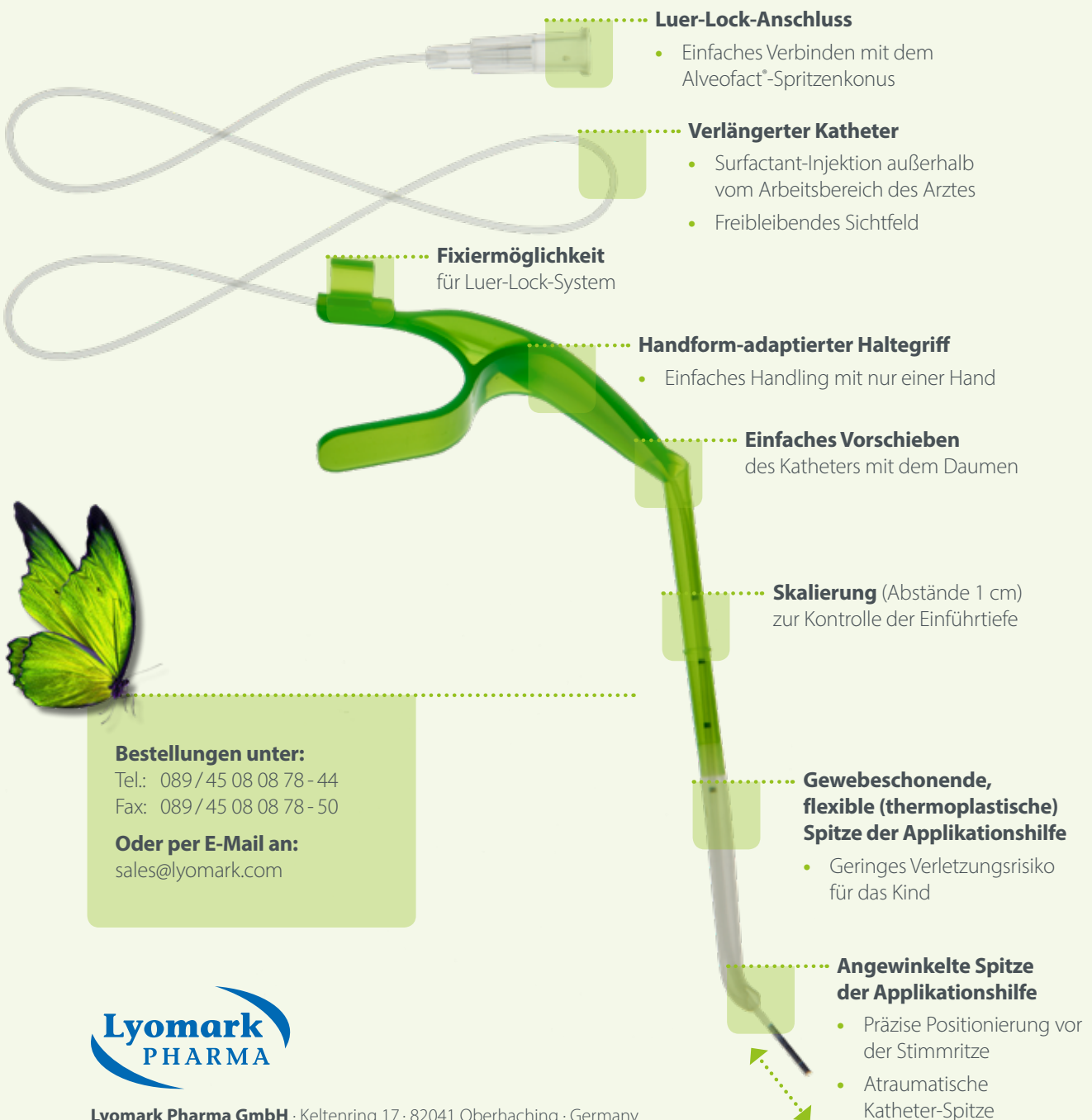

### Bestellungen unter:

Tel.: 089 / 45 08 08 78 - 44

Fax: 089 / 45 08 08 78 - 50

### Oder per E-Mail an:

[sales@lyomark.com](mailto:sales@lyomark.com)



Lyomark Pharma GmbH · Keltenring 17 · 82041 Oberhaching · Germany

Phone: +49 89 45 08 08 78 0 · [info@lyomark.com](mailto:info@lyomark.com) · [www.lyomark.com](http://www.lyomark.com)



Murrplastik Medizintechnik GmbH · Gewerbering 11 · 08223 Falkenstein · Germany

CE 0124